

Ich bin dankbar, durch
den **FETAL-PORT** (F)
wächst mein Baby
weiter!





PRENATAL PORT SYSTEM

TITAN-PORT (F)

PakuMed[®]
medical products gmbh

TITAN-PORT (F) **(FETAL-PORT) Prenatal Portsysteem**

Artikelnr: 111243 F

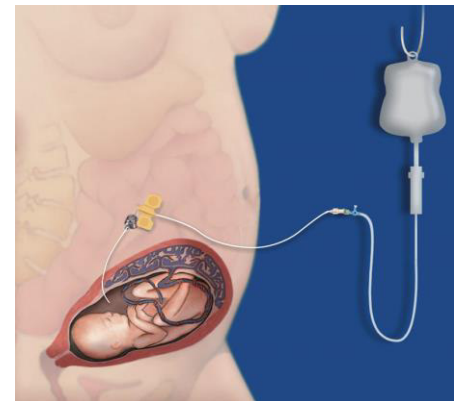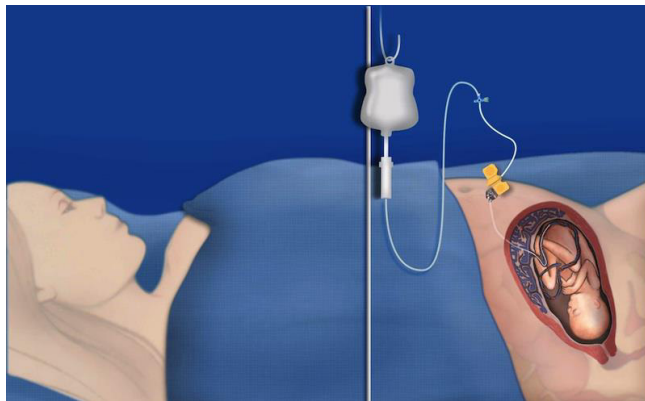

FETAL NUTRITION PORT-SYSTEM

AFR-PORT (Amniotic Fluid Replacement PORT-SYSTEM)

Indikationen:	Plazentainsuffizienz mit intrauteriner Wachstumsretardierung (IUGR)(intrauterine growth restriction)	Früher vorzeitiger Blasensprung mit Anhydramnion (PPROM) (preterm premature rupture of membranes)
Kontraindikation:	Hinterwandplazenta	Fehlbildung von Fötus oder Plazenta, Choramnionitis, Wehentätigkeit bei Diagnosestellung
Ziel:	Wachstumsverbesserung des Feten, Verlängerung der Schwangerschaft	Verlängerung der Schwangerschaftsdauer und Senkung der perinatalen Morbidität und Mortalität
Anwendung:	Kontinuierliche Zufuhr von Aminosäuren und ggf. Glucose über ein implantiertes Portsysteem in die Nabelschnurvene	Über ein Portsysteem kontinuierliche Amnioinfusion
Zeitpunkt:	Zwischen der 24.-32. Schwangerschaftswoche bei intrauteriner Wachstumsrestriktion (Intrauterine Growth Restriction – IUGR: geschätztes Gewicht <10.Perzentile, pathologische Doppler-Parameter)	Zwischen 22. und 30. SSW bis zur Entbindung
Platzierung:	Implantation des Portsystems ist <u>nur</u> bei anteriorer- oder anterior-lateral gelegener Plazenta möglich	Subkutan implantiertes Portsysteem mit sonographisch gesteuerter Platzierung des Katheters in die Fruchthöhle
Behandlungsdauer:	Täglich, das Volumen der intraumbilicalen Infusion ist begrenzt auf 10% des geschätzten fetoplazentaren Blutvolumens/Tag	Kontinuierliche Infusion von 50-120,ml/h Amnion Flush Solution über das Portsysteem

Weitere Informationen über **PakuMed medical products gmbh** oder Univ.-Prof. Dr. med. M. Tchirikov, Universitätsklinikum Halle (Saale), Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin, Ernst-Grube-Str. 40, 06120 Halle (Saale); Tel.: 0049 345 557-3250, Fax: 0049 345 557-2448, @: michael.tchirikov@uk-halle.de